

Οδηγίες Καθαρισμού και Συντήρησης Συσκευής Ιοντοφόρησης Idromed 5 PS / GS

1. Μετά από κάθε θεραπεία αδειάστε το νερό και στεγνώστε τα δοχεία, τις μεταλλικές πλάκες (ηλεκτρόδια) και τα καλώδια σύνδεσης τους με ένα πανί.
2. Αν απαιτηθεί, απολυμάνετε το σετ θεραπείας (δοχεία, ηλεκτρόδια, προστατευτικά πλέγματα) με ένα συμβατικό απολυμαντικό του εμπορίου.
3. Καθαρίστε την συσκευή εξωτερικά με ένα νωπό πανί, αν χρειαστεί. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ποτέ για τον καθαρισμό τραχεία υλικά ή διαλύματα αλκοόλης, ασετόν ή βενζίνης.

4. Οι μεταλλικές πλάκες (ηλεκτρόδια) και τα προστατευτικά πλέγματα χρειάζεται να καθαρίζονται συστηματικά με ξύδι (για απομάκρυνση επικαθίσεων αλάτων).
5. Ξεπλύνεται καλά τους σπόγγους (για θεραπεία στις μασχάλες) με τρεχούμενο νερό μετά την χρήση και αφήστε τους να στεγνώσουν. Αποφύγετε την τοποθέτησή τους στον ήλιο ή πάνω σε κάποιο θερμαινόμενο σώμα.