


Η αυτόματη συσκευή απολύμανσης χεριών είναι ασφαλής και εύκολη στη χρήση, κατάλληλη για σπίτια, ξενοδοχεία, ιατρεία, νοσοκομεία και δημόσιους χώρους. Λειτουργεί με φωτοκύτταρο, χωρίς να απαιτείται η επαφή της συσκευής με τα χέρια εμποδίζοντας έτσι την αλληλεπιμόλυνση. Για παροχή ρεύματος χρησιμοποιεί αλκαλικές μπαταρίες 4X1,5 V. Η συσκευή είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εύκολη στη χρήση και κατάλληλη για μακροχρόνια χρήση. Έχει διακριτικό σχεδιασμό και είναι κατάλληλη για διάφορα είδη υγρών απολυμαντικών ή υγρών σαπουνιών.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- \* Συσκευή με φωτοκύτταρο, αυτόματη ενεργοποίηση
- \* Χωρίς επαφή / αποφυγή επιμόλυνσης
- \* Ασφάλεια, ευκολία, καθαριότητα
- \* Μεγάλο μέγεθος δοχείου 700ml
- \* Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- \* Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
- \* Λειτουργεί με 4 μπαταρίες μεγέθους D 1,5 volt
- \* Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- \* Κατάλληλη για υγρό σαπούνι ή αλκοολούχο απολυμαντικό


### ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

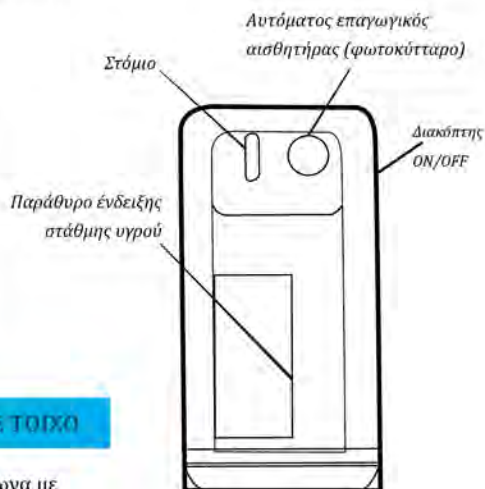

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

1. Σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης στον τοίχο σύμφωνα με τις εγχοπές στην πλάτη της συσκευής, κατόπιν τρυπήστε 3 σταθερές οπές των 6mm και στη συνέχεια τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά βύσματα και τις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. **(ΕΙΚ. 1)**
2. Ευθυγραμμίστε τις εγχοπές στην πλάτη της συσκευής με τις βίδες στον τοίχο, στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή στις βίδες και σύρετε από πάνω προς τα κάτω. **(ΕΙΚ. 2)**

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** - Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργεί πάνω σε πάγκο.

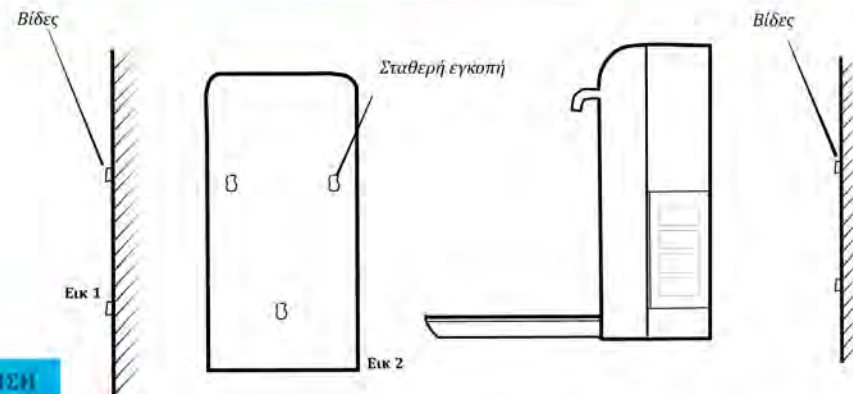

### ΧΡΗΣΗ

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής πιέζοντας ελαφρά το κουμπί στο πάνω μέρος της, τοποθετήστε στην εσοχή τη φιάλη που έχετε γεμίσει με υγρό απολυμαντικό ή σαπούνι, κλείστε το μπροστινό κάλυμμα και στη συνέχεια, ασφαλίστε το. Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην θέση «ON». Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές έως ότου φύγει ο αέρας που υπάρχει μέσα στα σωληνάκια της συσκευής και αρχίσει να τρέχει το υγρό απολυμαντικό.
2. Όταν θέλετε να απολυμάνετε τα χέρια σας, βάλτε τα κάτω από το στόμιο σε απόσταση περίπου 6cm. Η συσκευή θα ψεκάσει ομοιόμορφα και την ίδια στιγμή φωτάκι λειτουργίας θα ανάψει για μία φορά. Μετά τον ψεκασμό, απομακρύνετε τα χέρια από την περιοχή του φωτοκύτταρου.
3. Αν το φωτάκι λειτουργίας αναβοσβήνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί 4 μπαταρίες μεγέθους D 1,5 volt.
4. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "OFF". Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής, τραβήξτε έξω με το χέρι τη θήκη των μπαταριών και στη συνέχεια αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες. Τέλος, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση "ON".

**Εναλλακτικά της λειτουργίας με μπαταρίες, αυτή η συσκευή διαθέτει βύσμα για σύνδεση με εξωτερικό καλώδιο παροχής ρεύματος με μετασχηματιστή (δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Το παρεχόμενο ρεύμα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλείας: απαιτήσεις ισχύος DC6V, 500MA. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο ρεύμα, χωρίς τη χρήση μετασχηματιστή.**

