

RESPIPROGRAM

Οδηγίες χρήσης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

REF 33442



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy



ΟΔΗΓΙΕΣ

Τοποθετήστε την μονάδα στο ύψος του στόματος.

Εκπνεύστε κανονικά πριν εισπνεύσετε.

- 1) ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΕ βαθιά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ακροστόμιο μέχρι να σηκώσετε τις τρεις σφαίρες, εάν είναι δυνατόν.
- 2) ΚΡΑΤΗΣΤΕ την εισπνοή για τον δυνατόν περισσότερο χρόνο.
- 3) ΕΚΠΝΕΥΣΤΕ αφήστε το ακροστόμιο και εκπνεύστε. Επαναλάβετε την διαδικασία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

η συσκευή αποτελείται από

N. 1 Βάση

N. 3 Μπαλίτσες διαφορετικές μεταξύ τους σε διαστάσεις και χρώμα

N. 1 Διάφανο κορμό τριών χώρων

N. 1 Σωλήνα με ακροστόμιο

ΥΛΙΚΟ

Βάση με μπαλίτσες από ατοξικό πολυοροπυλένιο.

Κορμός τριών χώρων από συμπολυμερές /ατοξικό πολυστυρένιο.

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο και ακροστόμιο από ατοξικό πολυπροπυλένιο.