

VAH

IHO

CE 0482



approved for disinfection of
gas detectors with CO sensor
HONEYWELL

approved by
WEINMANN

Δραστικές ουσίες σε 100g: 3.33 g Didecyltrimethylammoniumchloride; 6.66 g Benzylalkyldimethylammoniumchloride

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	10	1 l	141.130.1000
Φιάλη	6	2 l	
Δοχείο	3	5 l	141.130.5000
Δοχείο	1	10 l	

CLEANISEPT®

Συμπυκνωμένο υγρό για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών – δαπέδων

- ελεύθερο αλδεϋδών με εξαιρετική καθαριστική ιδιότητα
- κατάλληλο για απολύμανση στον τομέα των τροφίμων
- χωρίς άρωμα

Το **CLEANISEPT** είναι ένα συμπυκνωμένο άοσμο διάλυμα, χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση για την απολύμανση και τον καθαρισμό των δαπέδων και των επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διάλυμα ταχείας απολύμανσης, χωρίς αλκοόλη, για επιφάνειες από ακρυλικό γυαλί. Είναι ιδανικό για χώρους εστίασης, καθώς επίσης και για χώρους αναμονής, ιατρεία κτλ.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			5 λεπτ.	15 λεπτ.	30 λεπτ.	60 λεπτ.
Βακτήρια και μύκητες						
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (δοκιμή 4-τομέα, (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο))*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμ. συνθήκες	7.5 %	2.5 %		1 %
Ιοί						
Δραστικό έναντι SV40 / παποβαϊών	EN 14476	μολυσμ. συνθήκες	5 %		2 %	
Πρόσθετα αποτελέσματα EN* test						
Βακτηριοκτόνο	EN 13697	καθαρές συνθήκες	0.25 %			
	EN 1276	καθαρές συνθήκες	0.25 %			
Μυκητοκτόνο	EN 13697	καθαρές συνθήκες	0.25 %			
	EN 1650	καθαρές συνθήκες	0.25 %			

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

Να χρησιμοποιήτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.

