

WIP'ANIOS Premium

- Μαντηλάκια από βισκόζη 100% βιοδιασπάσιμα.
- Διάλυμα εμφάπτισης: Σύνθεση χωρίς CMR, άρωμα ή αλκοόλες.
- Ευρύ φάσμα ιοκτόνου δράσης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα μαντηλάκια WIP'ANIOS PREMIUM είναι εμφαπτισμένα σε καθαριστικό και απολυμαντικό διάλυμα, για χρήση σε ιατρικές συσκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύνθεση: 100% βισκόζη (50 gr/m²)
- Μέγεθος ανά μαντηλάκι: 180 x 200 mm
- Διάλυμα εμποτισμού: 5 ml SURFA'SAFE ανά μαντηλάκι

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το διάλυμα εμφάπτισης περιέχει διδεκυλοδιμεθυλο χλωριούχο αμμώνιο, πολυ(εξαμεθυλενο) υδροχλωρική διγουανιδή, κατιονικά και αμφοτερικά τασιενεργα, αποσκληρυντικούς παράγοντες, έκδοχα.

Μαντηλάκια μιας χρήσεως




WIP'ANIOS Premium


Οδηγίες Χρήσης



• Πάρτε ένα μαντηλάκι και διασφαλίστε πως η συσκευασία είναι κλειστή μετά την χρήση.

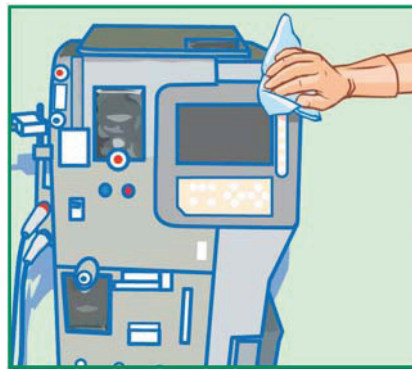

• Τρίψτε με το μαντηλάκι την επιφάνεια. Χρησιμοποιείστε και δεύτερο μαντηλάκι αν είναι απαραίτητο. Τηρήστε τον χρόνο επαφής σύμφωνα με την επιθυμητή δράση.

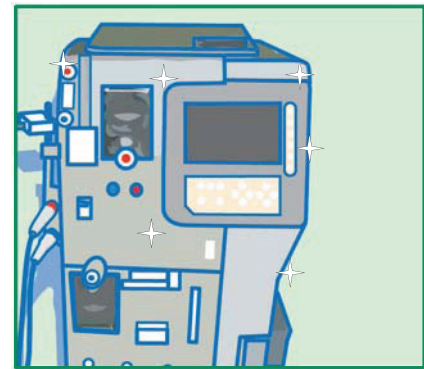

• Αφήστε να στεγνώσει. Μην ξεβγάζετε μετά την χρήση, εκτός εάν η ιατρική συσκευή πρόκειται να έρθει σε επαφή με βλεννογόνους. Κλείστε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε άνοιγμα.

• Μην ξαναχρησιμοποιείτε το μαντηλάκι. Η απολύμανση δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Σημείωση: Το WIP'ANIOS PREMIUM δεν αντικαθιστά το στάδιο του καθαρισμού – απολύμανσης με βυθισμό όπου αυτό είναι δυνατόν.

Μικροβιολογικές ιδιότητες

Το διάλυμα εμβάπτισης είναι :

Δραστικό έναντι	Πρότυπα	Χρόνος επαφής
Βακτηρίδια	EN 1040, EN 13727, EN 13697	2 λεπτά
	MRSA EN 13697	2 λεπτά
Μυκοβακτηρίδια	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	15 λεπτά
Ζύμες	EN 1275, EN 13624, EN 13697	5 λεπτά
Μύκητες	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 λεπτά
Ιοί	HIV-1, BVDV (υποκατάστατο του HCV), PRV (υποκατάστατο του HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus, VRS	1 λεπτά

Προφυλάξεις κατά την χρήση

Επικίνδυνο – τηρήστε τις προφυλάξεις χρήσης (συνταγμένες σύμφωνα με την Οδηγία 99/45/EC και τις τροποποιήσεις της) Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +35°C. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIβ (Οδηγία 93/42/EEC όπως αναπροσαρμόστηκε)

Συσκευασία

- 6 συσκευασίες με 100 μαντηλάκια έκαστη.....κωδ. 2088.655
- 12 συσκευασίες με 50 μαντηλάκια έκαστη.....κωδ. 2088.424

