

DeClogger® καθετήρα εντερικής σίτισης

Το Bionix® DeClogger βοηθάει τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να καθαρίσει αποφραγμένους καθετήρες G, J και PEG σε λιγότερο από δύο λεπτά για την αποκατάσταση της παροχής φαρμάκου και τη μείωση της πρόωρης αντικατάστασης του καθετήρα.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αναπόφευκτα, με την πάροδο του χρόνου, οι καθετήρες G, J, και PEG φράσσουν καθιστώντας αδύνατη για τους ασθενείς τη λήψη θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων.

ΛΥΣΗ

Το DeClogger, μια ασφαλής, εύκαμπτη σπειροειδής συσκευή που διανοίγει τις εμφράξεις για τη γρήγορη αποκατάσταση σίτισης και χορήγησης φαρμάκων σε ασθενείς που παρουσιάζουν απόφραξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καθετήρες εντερικής σίτισης χωρίς εμφράξεις σε λιγότερο από δύο λεπτά και μπορούν να δώσουν στους ασθενείς τα θρεπτικά συστατικά και τα φάρμακα που χρειάζονται.

“Το DeClogger έχει μειώσει σημαντικά την ανάγκη αντικατάστασης του καθετήρα.”

- Scott Polsky, MD



Rx ONLY

MADE IN
THE U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com




ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


DeClogger® καθετήρα εντερικής σίτισης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - Τα DeCloggers διατίθενται σε συσκευασία των 10.


ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Η ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ

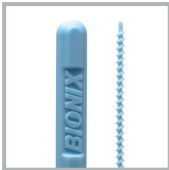

Μπλε DeClogger | #911
Μέγεθος: 14 – 16 Γαλλικό
Μήκος: 39,5 cm
Συμβατό με ENFit®



Κίτρινο DeClogger | #912
Μέγεθος: 16 – 22 Γαλλικό
Μήκος: 39,5 cm
Συμβατό με ENFit®



Πράσινο DeClogger | #913
Μέγεθος: 20 – 22 Γαλλικό
Μήκος: 39,5 cm
Μη συμβατό με ENFit®

ΤΥΠΟΣ ΡΕΓ Η ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Καφέ DeClogger | #921
Μέγεθος: 14 – 16 Γαλλικό
Μήκος: 21,5 cm
Συμβατό με ENFit®



Πορτοκαλί DeClogger | #922
Μέγεθος: 18 – 24 Γαλλικό
Μήκος: 21,5 cm
Συμβατό με ENFit®

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ

Δοκιμή σε σταθερή θέση ολοκληρωμένη	Τύπος δοκιμής	Σενάριο	Αριθμός δοκιμών	Αποτελέσματα δοκιμής	Επίπεδο C/R
Απομάκρυνση έμφραξης	Προσομοιωμένη χρήση	Μέγιστο μέγεθος καθετήρα και ελάχιστο μέγεθος καθετήρα, χειρότερη περίπτωση	n=30/μέγεθος καθετήρα	100% επιτυχία	95/90
Χρόνος απομάκρυνσης έμφραξης				AVG + SD < 2,0 min.	
Αποτυχία εξαρτήματος				Καμία αποτυχία	
Συμβατότητα ENFit				Συμβατό 100%	

*Η εργαστηριακή δοκιμή σε όρθια θέση διεξήχθη στην Bionix στις χειρότερες περιπτώσεις. Οι καθετήρες αποφράχτηκαν με έμφραξη συσσωματωμένης πρωτεΐνης και ινών. Οι οδηγίες χρήσης του DeClogger® χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και τον καθαρισμό των εμφράξεων. Το χρονόμετρο χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση όλου του χρόνου της διαδικασίας, ξεκινώντας από τον έλεγχο βατότητας και τελειώνοντας στην ορατή αφαίρεση έμφραξης (που ελέγχεται με σύριγγα). Ως χειρότερη περίπτωση ορίζεται ο μεγαλύτερος καθετήρας που υποδεικνύεται και ο μικρότερος καθετήρας που υποδεικνύεται για κάθε τύπο DeClogger. Ως "Συμβατότητα ENFit" ορίζεται η ικανότητα του DeClogger να διαπερνάει απρόσκοπτα στην εγκεκριμένη συσκευή σίτισης ENFit χωρίς οποιαδήποτε άσκοπη δύναμη να απαιτείται για την εισαγωγή.

Το ENFit® και το NRFit™ είναι εμπορικά σήματα της GEDSA.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

800.551.7096 · www.bionix.com