


! Αφήστε το προϊόν SieloCovidAg® σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά (20°C -30°C) πριν από τη χρήση του. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μία (1) ώρα αν ανοικτεί! (Χρησιμοποιήστε γάντια και διασφαλίστε καθαρό χώρο εφαρμογής).
Χρησιμοποιήστε αμέσως όταν η υγρασία είναι > 60%.

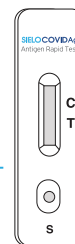

Ανοίξτε την σφραγισμένη θήκη και αφαιρέστε την κασέτα του SieloCovidAg®, τοποθετήστε την σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

Κρατήστε την σφραγισμένη θήκη για να απορρίψετε ασφαλώς τα υλικά εφαρμογής του τεστ.




ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΕΛΩΝ




Παρατηρήστε τα αποτελέσματα της δοκιμής μέσα σε 15~20 λεπτά. Η ανάγνωση να πραγματοποιείται με δυνατό φωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι άκυρο σε περισσότερο από 20 λεπτά.


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

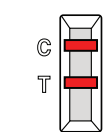

ΘΕΤΙΚΟ

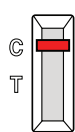

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

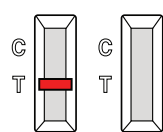

ΑΚΥΡΟ

ΘΕΤΙΚΟ: Εμφανίζονται δύο ξεχωριστές γραμμές. Η μία γραμμή πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή ελέγχου (C) και η άλλη γραμμή στην περιοχή δοκιμής (T) που δηλώνει ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ακόμα και αν η γραμμή είναι αχνή, μόλις που διακρίνεται, το αποτέλεσμα αξιολογείται ως θετικό.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εμφανίζεται μια γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C). Δεν εμφανίζεται γραμμή στην περιοχή δοκιμής (T).

ΑΚΥΡΟ: Δεν εμφανίζονται γραμμές ή δεν εμφανίζεται η γραμμή ελέγχου (C), υποδεικνύοντας σφάλμα χρήστη ή αστοχία αντιδραστήριου. Επληθεύστε τη διαδικασία δοκιμής και επαναλάβετε τη δοκιμή με μια νέα συσκευή SieloCovidAg®.



DyonMed S.A.
Point of Care Solutions



Γραμμή Επαγρύπνησης
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
211 8004723