



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

- Παρασκευή του διαλύματος με βύθιση:

- προετοιμάστε την ποσότητα ζεστού νερού που απαιτείται στην ειδική δεξαμενή, ελέγχοντας ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 35 °C (το ζεστό νερό βοηθά στη διάλυση της σκόνης)

- ρίξτε την απαραίτητη δόση ανά λίτρο νερού σύμφωνα με την επιθυμητή δραστηριότητα.

- αναμίξτε το διάλυμα έως ότου ληφθεί ένα διαυγές μπλε χρώμα.

- περιμένετε 15 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το διάλυμα.

- Απολύμανση:

- χρησιμοποιήστε 8 g ανά λίτρο νερού, βυθίστε τα όργανα στο διάλυμα για 10 λεπτά.

- σε περίπτωση επιμονής οργανικών υπολειμμάτων, προχωρήστε στο πλύσιμο των οργάνων χρησιμοποιώντας κατάλληλο απορρυπαντικό.

- για τη δραστηριότητα που περιγράφεται, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών από το παρασκεύασμα (ανάλογα με την ποσότητα των εργαλείων που υποβάλλονται σε επεξεργασία).

- Σποριοκτόνος δραστηριότητα:

- χρησιμοποιήστε 8 g ανά λίτρο νερού, βυθίστε τα όργανα στο διάλυμα για 10 λεπτά

- για τη δραστηριότητα που περιγράφεται, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρόνο 24 ωρών από την παρασκευή.

- Υψηλού επιπέδου απολύμανση / αποστείρωση εν ψυχρώ:

- χρησιμοποιήστε 16 g ανά λίτρο νερού, βυθίστε τα όργανα στο διάλυμα για 10 λεπτά.

- μετά το χρόνο επαφής, αφαιρέστε τα όργανα και ξεπλύνετε με αποστειρωμένο νερό.

- στεγνώστε και φυλάξτε ασηπτικά

- για τη δραστηριότητα που περιγράφεται, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρόνο 24 ωρών από την παρασκευή του.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις επισημάνσεις χρήσης στην ετικέτα.