



**Laerdal**<sup>®</sup>  
helping save lives



Η εκπαίδευση σώζει ζωές

## Little Junior Q CPR

Ο απολογισμός της εκπαίδευσης με βάση την παρακολούθηση μόνο των εκπαιδευομένων είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους εκπαιδευτές.

Η επόμενη γενιά Little Junior περιλαμβάνει μετρήσεις Q CPR και τεχνολογίες απολογισμού της εκπαίδευσης, όλα στην παλάμη του χεριού σας.

Το Little Junior Q CPR λειτουργεί με μια εφαρμογή Instructor που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε μέχρι και έξι εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα και μια εφαρμογή Learner που επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν τις δικές τους επιδόσεις. Το Little Junior Q CPR βοηθά τους εκπαιδευτές να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης CPR, προσθέτοντας ένα διασκεδαστικό όσο και συναρπαστικό στοιχείο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.



laerdal.com



# Little Junior® QCPR

Το Little Junior QCPR είναι το ίδιο ανθεκτικό, ελαφρύ πρόπλασμα με το αρχικό Little Junior, με τεχνολογία QCPR που παρέχει:

- Απολογισμό σε πραγματικό χρόνο για τις συμπίεσεις και τις εμφυσησεις
- Μια σύνοψη με συνολική βαθμολογία και προτάσεις βελτίωσης
- Λεπτομέρειες σχετικά με την απελευθέρωση της συμπίεσης, το βάθος και το ρυθμό, τον όγκο εξαερισμού, τον αριθμό των συμπίεσεων / εξαερισμών / κύκλων

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Εύκολο στη μεταφορά με ανθεκτική κατασκευή που επιτρέπει τη μακροχρόνια χρήση.
- Το στόμα και η ρινική οδός επιτρέπουν ρεαλιστικές εμφυσησεις που απαιτούνται για αερισμό στόμα-με-μύτη και στόμα-με-στόμα.
- Η φυσική απόφραξη των αεραγωγών επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν τη σημαντική τεχνική της απελευθέρωσης του αεραγωγού, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν εξωτερικές θωρακικές συμπίεσεις.
- Η έκταση κεφαλής, το τράβηγμα πηγουνιού και η ανάσπαση κάτω γνάθου, επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν στις σωστές πρακτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναζωογονήσουν έναν πραγματικό ασθενή.
- Ρεαλιστική λειτουργία των αεραγωγών. Ο αεραγωγός παραμένει αποφραγμένος χωρίς κατάλληλη έκταση κεφαλής ή τράβηγμα πηγουνιού ή ανάσπαση κάτω γνάθου. Το στήθος εκπνύσσεται με σωστές εμφυσησεις.
- Τα ακριβή ανατομικά σημεία (το πλευρικό τόξο, η ξιφοειδής απόφυση) επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να αναγνωρίσει όλα τα ανατομικά σημεία για την πρακτική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ.
- Το ηχητικό σήμα "clicker" βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εκπαιδευτούν στο σωστό βάθος των εξωτερικών θωρακικών συμπίεσεων.
- Η ρεαλιστική αντίσταση του στήθους επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν την σωστή πίεση που απαιτείται προκειμένου να εξασκηθούν στις σωστές εξωτερικές θωρακικές συμπίεσεις σε μια πραγματική περίπτωση.
- Οικονομικοί αεραγωγοί μιας χρήσης για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πρόσωπο για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Επιτρέπει στον εκπαιδευτή μέσω ειδικής εφαρμογής, να παρακολουθεί τις επιδόσεις μέχρι και έξι εκπαιδευόμενων ταυτόχρονα, επεμβαίνοντας άμεσα σε περιπτώσεις που οι πιέσεις δεν έχουν τη σωστή συχνότητα ή βάθος ή όταν ο αερισμός δεν είναι σωστός (Μοντέλο QCPR)
- Latex Free υλικό για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων. Αεραγωγοί με βαλβίδα αποκλεισμού επαναεισπνοής αέρα για την υγιεινή.
- Ασύρματη σύνδεση με την εφαρμογή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων για άμεση παρακολούθηση της επίδοσης και πλήρη απολογισμό και σκορ στο τέλος της εκπαίδευσης



## ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

128-01050 Little Junior QCPR  
128-03050 Little Junior QCPR Dark  
129-01050 Little Junior QCPR 4-Pack  
129-03050 Little Junior QCPR 4-Pack Dark  
128-60750 Little Junior QCPR Upgrade Kit

ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 ΕΤΟΣ

## Αξεσουάρ και Αναλώσιμα

123-30050 S killGuide with extension cable 123-50550 Extension Cable for SkillGuide  
183210 Junior Airways (pkg. 25)  
123211 Junior Airways (pkg. 100)  
15120103 M anikin Face Shields (6 rolls of 36 ea)  
152400 Manikin Wipes (pkg. 50)  
152401 Manikin Wipes (pkg. 1200)  
183010 Junior Faces (pkg. 6)

Επισκεφτείτε μας στο <https://medical.gr/laerdal.html> για περισσότερες πληροφορίες

