

MedRust αφρός

**αντискωριακό
κλιβάνων**

έτοιμο προς χρήση



1000 ml



4000 ml

αντискωριακό ανοξειδωτων κλιβάνων έτοιμο προς χρήση

Το Med Rust είναι αντискωριακό υγρό καθαρισμού και συντήρησης κλιβάνων σε μορφή αφρού.

Προστατεύει αποτελεσματικά τα τοιχώματα του κλιβάνου από σκουριά, άλατα, οξείδωση και διάβρωση.

Με την μορφή αφρού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής του προϊόντος στα τοιχώματα, με αποτέλεσμα την καλύτερη καθαριότητα αλλά και την αποσμητική δράση.

- Ξεπλένεται εύκολα
- Είναι άοσμο
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Χωρίς προωθητικό αέριο

Προστασία των ασθενών: Οι ιατρικοί κλίβανοι χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση των ανοξειδωτων ιατρικών εργαλείων. Η χρήση του αντискωριακού MedRust διασφαλίζει ότι τα εργαλεία είναι απαλλαγμένα από σκουριά η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον κίνδυνο για τους ασθενείς.

Καθαρισμός και στέγνωμα: Μετά από κάθε χρήση ακόμα καθαρίστε προσεκτικά τον κλίβανο και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως στεγνός. Η υγρασία είναι εχθρός του μετάλλου και μπορεί να προκαλέσει σκουριά.

Πρόληψη της μόλυνσης: Χρησιμοποιώντας το αντискωριακό RustMed, αποτρέπεται την σκουριά και την διάβρωση των εσωτερικών επιφανειών του κλιβάνου. Η σκουριά μπορεί να είναι επικίνδυνη και να επηρεάζει την ασφάλεια των ασθενών και την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης.

Περιέχει κάτω του 5% φωσφορικές ενώσεις, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

UFI: D300-S00D-J00A-G285

Οδηγίες Χρήσης:

Ψεκάστε τα εσωτερικά τοιχώματα του κλιβάνου (σε κρύο κλίβανο) και αφήστε το να δράσει για 15 - 30 λεπτά.

Τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική).

Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές θέλετε.

Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά την εφαρμογή.

