



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

### SURFA'SAFE Premium

#### ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη βυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών.

Εφαρμογή βιοκτόνου: για γενικές επιφάνειες.

Το SURFA'SAFE PREMIUM είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν επιφανειακού καθαρισμού και απολύμανσης.

Συνδυάζει αποτελεσματικότητα ευρέως φάσματος, σύντομους χρόνους επαφής, εξαιρετική συμβατότητα με πολλαπλά υλικά (συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων στην αλκοόλη επιφανειών), και τις ιδιότητες ενός ήπιου καθαριστικού.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το SURFA'SAFE PREMIUM κατάλληλο για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος επιφανειών σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, και ιδανικό προϊόν για μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Έτσι, τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα, προσφέροντας τα αποτελέσματα απολύμανσης και το επίπεδο συμμόρφωσης που απαιτείται για αποτελεσματική απολύμανση που θα περιορίσει τη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών.

- Καλές ιδιότητες αφρισμού.
- Αποτελεσματική σύνθεση χωρίς περιττά συστατικά (χωρίς αρώματα και χρωστικές).
- Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα, αφήνει την επιφάνεια ορατά καθαρή.



**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

[www.anios.com](http://www.anios.com)

# SURFA'SAFE Premium

Απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη βυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών.

Εφαρμογή βιοκτόνου: για γενικές επιφάνειες.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Καθαρίζει και απολυμαίνει σε ένα βήμα
- Χωρίς οινόπνευμα, αρώματα και χρωστικές
- Αντιμικροβιακό ευρέως φάσματος και βελτιστοποιημένος χρόνος επαφής
- Συμπαγής συσκευασία αφρού για τον περιορισμό του σχηματισμού αερολυμάτων και πτητικών συστατικών (750 ml)
- Η σύνθεση διασφαλίζει συμβατότητα με μεγάλη γκάμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων και πολυμερών (π.χ. πολυανθρακικό, πλεξιγκλάς)
- Πυκνός αφρός για καλύτερη προσκόλληση στην επιφάνεια (750 ml)
- pH 6

## ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο - σύμφωνα με το: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 λεπτά
Ζυμομυκητοκτόνο - σύμφωνα με το: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 λεπτά
Φυματιοκτόνο - σύμφωνα με το EN 14348*	60 λεπτά
Δραστικό έναντι των ιών με μανδύα σύμφωνα με το EN 14476*	1 λεπτό
EN 14476* Polyomavirus SV40	5 λεπτά
EN 14476* Rotavirus	30 δευτ
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος σύμφωνα με το EN 14476*	30 λεπτά
EN 14476* Αδενοϊός	30 λεπτά
EN 14476* Νοροϊός (MNV)	15 λεπτά

\* ρυπαρές συνθήκες

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	2419544

## ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη βυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών.

Εφαρμογή βιοκτόνου: για γενικές επιφάνειες.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα έτοιμο για χρήση.

Ψεκάστε το απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα σε ένα non woven ύφασμα και σκουπίστε.

Απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> ή περίπου 10 ψεκασμούς).

Τηρείτε τον χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση.

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα εκτός εάν οι επιφάνειες πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τις βλεννογόνους.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και την απολύμανση των ιατρικών συσκευών.

Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης και τον καθαρισμό του υλικού εφαρμογής, συμβουλευτείτε το εκπονηθέν σχέδιο υγιεινής. Επιστημονικός φάκελος (αποτελεσματικότητα, συμβατότητα, κλπ.) διαθέσιμος μετά από αίτημα.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Χλωριούχο διδευκyl-διμεθυλ-αμμώνιο (Αρ. CAS 7173-51-5: 3 mg/g), μη ιονικά επιφανειοδραστικά, συμπλοκοποιητικός παράγοντας, έκδοχα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατρική συσκευή και βιοκτόνο.

Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση του SURFA'SAFE Premium περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση: σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +25°C.

Η διάρκεια ζωής του SURFA'SAFE Premium είναι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στην ετικέτα. Η διάρκεια ζωής ισχύει εφόσον η φιάλη παραμείνει κλειστή μεταξύ χρήσεων.

Για τις συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης και για οδηγίες διάθεσης, συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

## ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΑ - ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.

Διάθεση του προϊόντος και του δοχείου του λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777 (Ελλάδα), 1401 (Κύπρος).

Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει σε σχέση με την συσκευή θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.



ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes - France  
Tél: +33 3 20 67 67 67  
Fax: +33 3 20 67 67 68  
www.anios.com

Εισαγωγή – Διανομή:  
**ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.  
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**  
Ξάνθου 10 Τ.Κ. 177 78, Ταύρος-Αθήνα,  
Τηλ. 2104838224 – Fax. 2104838547  
e-mail. direct@pcosmidis.gr



www.ecolab.com



www.anios.com