


// Λογισμικό MIR Spiro

Γνωρίστε το μέλλον της διαχείρισης της αναπνευστικής υγείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ MIR SPIRO

Το **MIR Spiro** είναι το λογισμικό τελευταίας γενιάς για τη σπιρομέτρηση και την οξυμετρία, συμβατό με όλες τις επαγγελματικές συσκευές MIR.


Σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτελεσματικά και απρόσκοπτα τόσο σε λειτουργικά συστήματα **MacOS** όσο και σε **Windows**, το MIR Spiro εξασφαλίζει σταθερή, αξιόπιστη και διαρκή εμπειρία χρήσης.

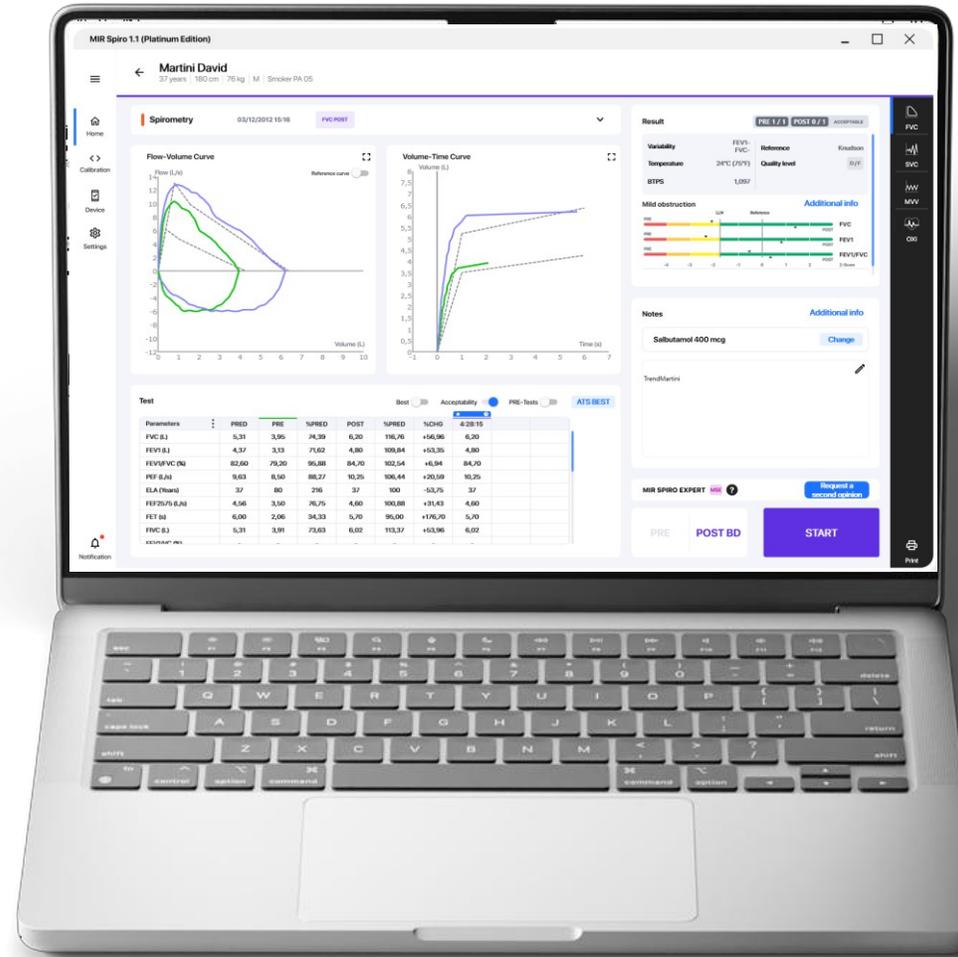

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MIR SPIRO

ΤΕΣΤ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

Το λογισμικό επιτρέπει **πιο εμπειριστατωμένες** διαγνώσεις χάρη στα **προηγμένα εργαλεία** για σπιρομέτρηση & οξυμετρία.

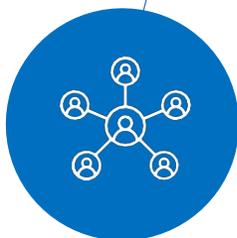

EMR/EHR - INTEGRABLE

Σχεδιασμένο για να **ενσωματώνεται** με ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους.




ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ATS/ERS

Συμβατό με τα πιο προηγμένα πρότυπα (ATS/ERS 2019, HIPAA & GDPR).



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ & ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Συμβατό με **Windows** και **MacOS**

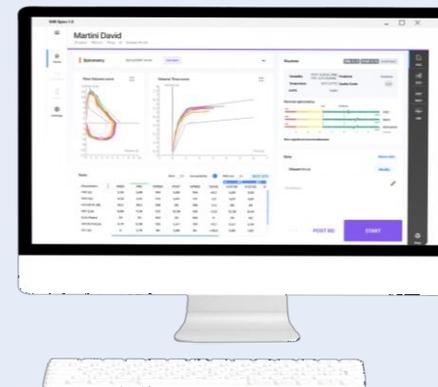

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟ MIR SPIRO

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ MIR



Σπιρόμετρο βασισμένο σε Η/Υ

MINISPIR



Φορητό με οθόνη αφής
Σπιρόμετρο με 3D
Οξυμετρία

SPIRODOC



Φορητό σπιρόμετρο
για Tablet και PC

**SPIROBANK II
SMART**



Απλοποιημένο φορητό
Σπιρόμετρο

**SPIROBANK II
BASIC**



Επιτραπέζια οθόνη αφής
Σπιρόμετρο με
ενσωματωμένο
εκτυπωτή

SPIROLAB

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

Ισχυρό και προηγμένο, το MIR Spiro αντικαθιστά το λογισμικό WINSPIRO παρέχοντας ένα **ευρύτερο φάσμα λειτουργιών** σε ένα **νέο γραφικό στυλ** και **προσαρμόσιμες ρυθμίσεις**.



ΌΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

✓ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΜΕ FVC, SVC, ΜVV.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ FVC ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ:

- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣΗΣ
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ
- ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



✓ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΞΥΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

- (6ΜWΤ)
- ΔΟΚΙΜΗ ΥΠΝΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ HOLTΕR
- ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΌΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

✓ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ EMR/ΕΗΡ


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΈΝΤΟΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ EMR/ΕΗΡ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΌΠΩΣ HL7, FHIR (JSON), GDT, DICOM, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΆΛΛΑ.

✓ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΈΩΣ ΚΑΙ 22 ΓΛΩΣΣΩΝ

✓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΡ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

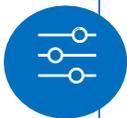

✓ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΪΟΨΗ ΤΟΣΟ ΤΗ ΡΟΗ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΓΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΠΙΟ ΑΞΪΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ.

✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΛΪΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.




ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ...



ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

WINSPIRO PRO - FVC

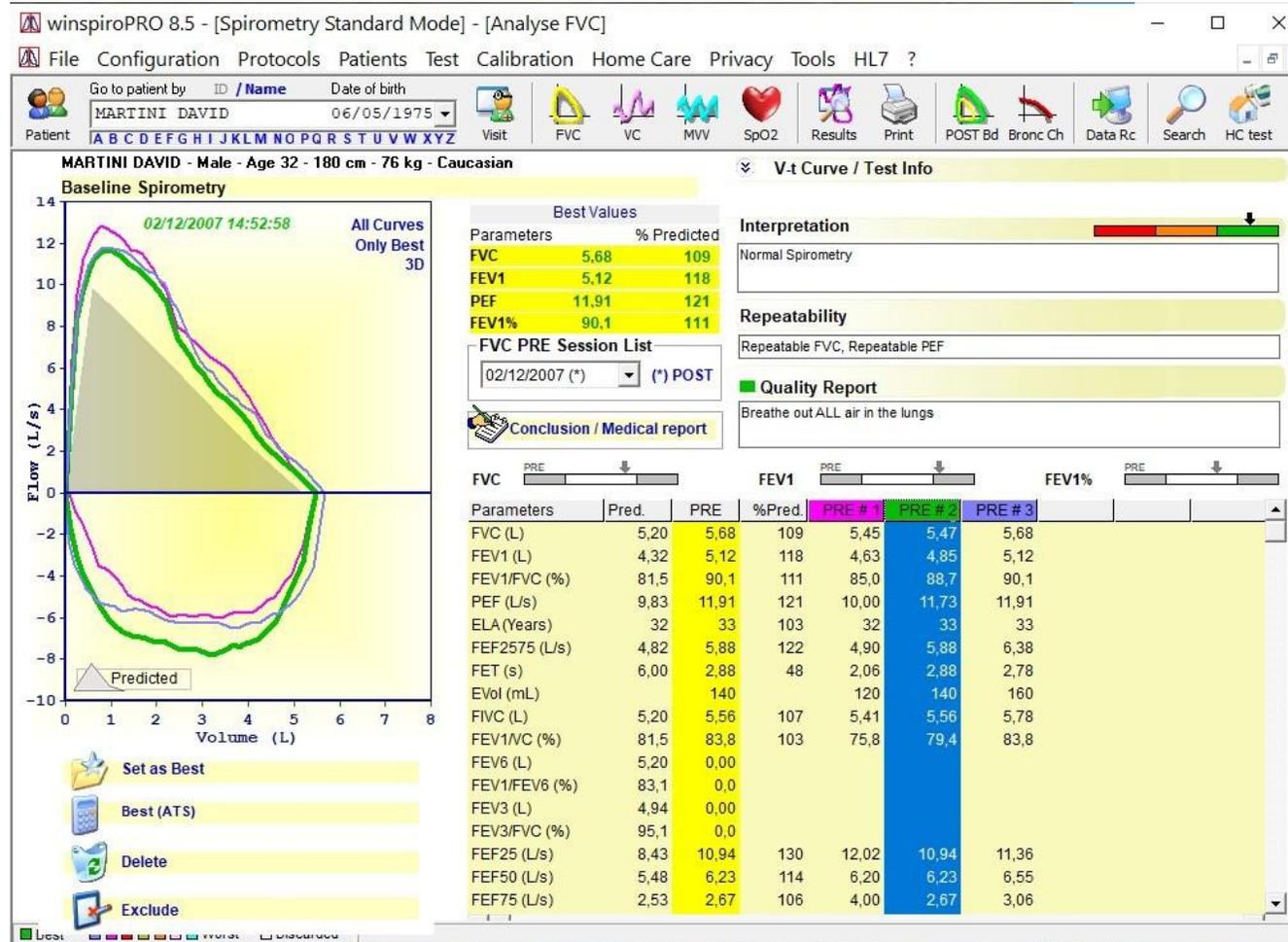

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

MIR SPIRO - FVC

Parameters

- FVC
- FEV1
- FEV1/FVC
- PEF
- ELA
- ESI
- FEF2575
- FET

ORIGINAL SETTINGS

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ.

- ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.
- ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ MIR SPIRO ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".

← Demo Patient
45 years | 180 cm | 80 kg | M | Former smoker PA 5

Spirometry

06/02/2025 10:23

FVC PRE

Flow-Volume Curve

Volume-Time Curve

Test

Parameters	PRED	LLN	PRE	%PRED	Z-Score	10:23:22	10:25:57
FVC (L)	5,28	4,17	5,51	104,36	0,34	5,45	5,51
FEV1 (L)	4,19	3,30	4,11	98,09	-0,15	4,08	4,11
FEV1/FVC (%)	79,70	69,10	74,60	93,60	-0,83	74,90	74,60
PEF (L/s)	9,35	5,93	9,21	98,50	-0,07	9,20	9,21
ELA (Years)	45	-	48	107	-	49	48
FEF25/75 (L/s)	3,93	2,21	3,24	82,44	-0,60	3,23	3,24
FET (s)	6,00	-	6,17	102,83	-	6,45	6,17
FVC (L)	5,28	4,17	5,34	101,14	0,09	5,08	5,34
FEV1/FVC (%)	-	-	-	-	-	-	-
FEV6 (L)	5,28	4,17	5,51	104,36	0,34	5,44	5,51
FEV1/FEV6 (%)	79,70	69,10	74,60	93,60	-0,83	75,00	74,60
FEF25 (L/s)	-	-	7,13	-	-	6,21	7,13
FEF50 (L/s)	-	-	3,79	-	-	3,77	3,79
FEF75 (L/s)	1,44	0,67	1,43	99,31	-0,01	1,50	1,43

Best
Acceptability
PRE-Tests
ATS BEST

Result

PRE 2 / 2 ACCEPTABLE

Variability: FEV10,03 (0,74%) | FVC0,06 (1,1%) | Reference: GLJ

Temperature: 19°C (66°F) | Quality level: B/B/-/-

BTPS: 1,12

Normal spirometry

Notes

Additional info

MIR SPIRO EXPERT MSE ?

Request a second opinion

PRE

START

ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΩΣΗΣ-ΘΓΚΟΥ
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΓΚΟΥ-ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΕΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

LLN (LOWER LIMIT OF NORMAL): Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. **ULN (ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ):** Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

ΠΟΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "BEST" ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ATS 2019, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ "ACCEPTABILITY" ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΗ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

WINSPIRO PRO - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Toolbar Preferences	
<input checked="" type="radio"/> Spirometry Standard Layout	
<input type="radio"/> Home Care Layout	
Server Connection Parameters	
User Name	Telemedicine Service
<input type="text"/>	<input type="text" value="Mir Telemedicine"/>
Password	
<input type="text"/>	
Proxy Server	
<input type="checkbox"/> Use proxy (network administrator only)	
IP Address	Port
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Use proxy user (only for network administrators)	
Proxy User Name	Proxy User Password
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Receiving via modem	
<input type="checkbox"/> Enable module for receiving via modem	
Receiving via XML	
<input type="checkbox"/> Enable module for receiving via XML	

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

MIR SPIRO - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ **ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ** ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΌΠΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ **Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ** ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ IT, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΈΩΣ ΚΑΙ 22 ΓΛΩΣΣΩΝ

Settings

Search settings

General

- Print
- Interpretation
- Test
- Privacy
- Default Values
- Users

LANGUAGE

English (United Kingdom)

UNIT OF MEASUREMENT

Metric Imperial (Metres, Kilogrammes)

DEFAULT ACTIONS

Open patient's results Double click on patient's name

AUTOMATICALLY CHECK FOR UPDATES AT STARTUP

Find updates

Download available updates

All updates

Critical updates only

Install updates (on app shutdown)

PROXY SETTINGS

Use proxy (network administrator only)

IP Address Port

Use proxy user (only for network administrators)

Proxy user name Proxy user password


ΤΟ MIR SPIRO ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ **ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ** ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ ΣΕ ΈΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ, **ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.**




ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ

MIR SPIRO - ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

SELECT THE EHR YOU WANT TO CONNECT TO

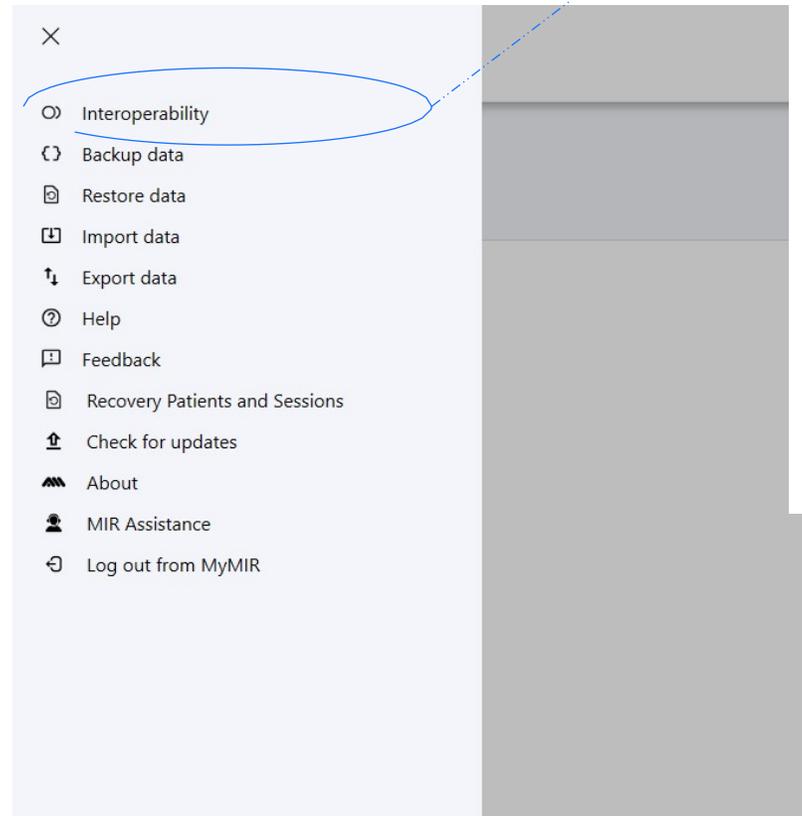

A screenshot of a software menu. The menu items are: Interoperability (circled in blue), Backup data, Restore data, Import data, Export data, Help, Feedback, Recovery Patients and Sessions, Check for updates, About, MIR Assistance, and Log out from MyMIR. A blue dashed arrow points from the 'Interoperability' item to the right-hand panel.

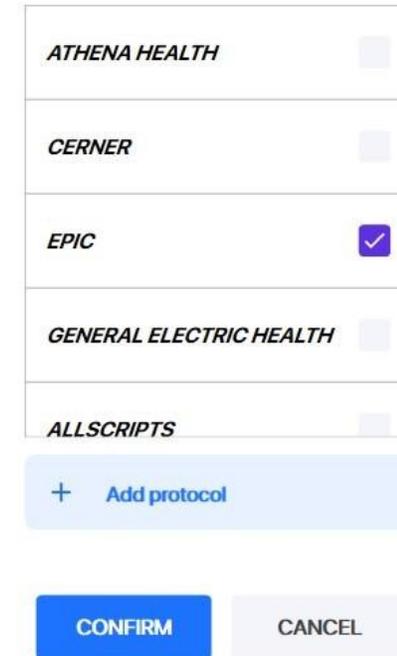

A screenshot of an interface titled "SELECT THE EHR YOU WANT TO CONNECT TO". It features a list of EHR providers with checkboxes: ATHENA HEALTH, CERNER, EPIC (checked), GENERAL ELECTRIC HEALTH, and ALLSCRIPTS. Below the list is a button labeled "+ Add protocol". At the bottom are two buttons: "CONFIRM" and "CANCEL".



MIR SPIRO PLATINUM



Με αναβάθμιση σε **MIR Spiro Platinum**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από το λογισμικό MIR Spiro



MIR SPIRO PLATINUM



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανταλλαγή δεδομένων χωρίς όρια μεταξύ του MIR Spiro και εξωτερικών πλατφορμών



ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Εντυπωσιαστείτε από την καινοτομία. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις



ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1 δωρεάν συνεδρία απομακρυσμένης βιντεοβοήθειας. Αποκτήστε ζωντανή υποστήριξη από έναν χειριστή της MIR οπουδήποτε και όποτε χρειαστείτε

Με το Platinum συνδρομητικό πρόγραμμα, θα έχετε **απρόσκοπτη πρόσβαση** σε όλες τις λειτουργίες του MIR Spiro, θα **ανταλλάσσετε δεδομένα απεριόριστα** και δωρεάν μεταξύ του MIR Spiro και απομακρυσμένων πλατφορμών και θα **έχετε πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο**, ενώ θα ενημερώνεστε για τις τελευταίες τάσεις, και όλα αυτά χωρίς περιορισμούς!



MIR SPIRO PLATINUM

Πρόσβαση σε όλα τα προνόμια



1 Έτος



2 Έτη



5 Έτη

Μπορείτε **να** αναβαθμίσετε σε **Platinum** ενεργοποιώντας μία από τις διαθέσιμες άδειες.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MIR SPIRO PLATINUM ΜΟΝΟ

ΔΟΚΙΜΗ

✓ FVC ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ.

✓ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΙΜΗ ΔΙΕΠΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΨΤΕ ΤΗ ΔΙΕΠΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ ΌΠΩΣ ΕΣΕΊΣ ΠΡΟΤΙΜΆΤΕ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΌ ΔΙΑΦΌΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΨΕΙΣ:

"MIRSPIROLIGHT" (ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΆΓΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΊΡΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ WINSPIROLIGHT)" MIRSPIROCONNECT" (ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΕΜΠΕΊΡΙΑΣ ΧΡΉΣΤΗ ΤΟΥ SPIROCONNECT)" MIRSPIROXPRESS" (ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΕΜΠΕΊΡΙΑΣ ΧΡΉΣΤΗ ΤΟΥ WINSPIROXPRESS)

✓ ΕΙΚΟΝΙΚΌΣ ΒΟΗΘΌΣ

ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΕΝΕΡΓΌΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΣΠΙΡΟΜΈΤΡΗΣΗΣ, ΤΟ MIR SPIRO ΕΜΦΑΝΊΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΆΞΥ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΈΤΡΗΣΗΣ (ΑΠΌΦΡΑΞΗ/ΣΥΣΤΌΛΉ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΎΛΗΣ ΡΉΣ/ΌΓΚΟΥ, ΠΑΡΕΧΌΝΤΑΣ ΔΙΑΓΝΨΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ.

✓ ΚΑΜΊΑ ΔΙΑΚΌΉ ΚΑΤΆ ΤΗ ΡΉΗ ΕΡΓΑΣΊΩΝ

ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΑΔΊΆΛΕΙΠΤΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ MIR SPIRO.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MIR SPIRO PLATINUM ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

✓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DDS)

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ MIR SPIRO ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ.

✓ ΈΚΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ.


✓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ PLATINUM

1 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΙΝΤΕΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.

✓ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΌΡΙΑ!



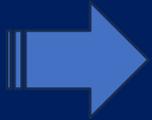

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ *ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ* ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ?

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΪΝΤΕΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΪΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΣΘΕΝΗ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΤΆΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΑΜΦΪΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΪΑΣ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ MIR PLUS

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΠΟΤΕ ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΗ! ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΛΪΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ MIR SPIRO ΚΑΙ ΣΤΕΪΛΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MIR. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΪΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΪΗ ΣΕ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΪΓΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ MIR SPIRO.

ESI INDEX

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΪΕΤΡΟΥ ΕΜΡΗΥΣΕΜΑ SEVERITY INDEX (ESI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΪΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΪΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESI).



Με το **συνδρομητικό πρόγραμμα Platinum**, αποκτάτε δωρεάν πρόσβαση σε μια **αποκλειστική συλλογή βίντεο**

σεμιναρίων που έχουν σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στη χρήση των συσκευών MIR. Κάθε σεμινάριο παρέχει σαφείς και πρακτικές οδηγίες, εξασφαλίζοντας μια διαισθητική και απρόσκοπτη εμπειρία. Είτε πρόκειται να ρυθμίσετε τη συσκευή σας, εκτελώντας δοκιμές ή εξερευνώντας προηγμένες λειτουργίες, αυτά τα βίντεο θα σας υποστηρίξουν σε κάθε βήμα. Μάθετε με το δικό σας ρυθμό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με καθοδήγηση από ειδικούς προσαρμοσμένη σε μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της ροής εργασίας σας.

