

Big Spray



Ταχείας δράσης έτοιμο για χρήση αλκοολούχο απολυμαντικό μικρών επιφανειών και εξοπλισμού (καρότσια, κρεβάτια, φορεία, κομοδίνα, κ.ά.) με ταυτόχρονο καθαρισμό λιποειδών ρύπων.

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα μικρόβια μπορούν να μεταφερθούν μέσω της απευθείας επαφής με μολυσμένες επιφάνειες. Η επιμελής και ταχεία απολύμανση των επιφανειών είναι επομένως απαραίτητη. Στην Αυστρία οι απαιτήσεις για ταχεία απολύμανση επιφάνειας έχουν μειωθεί στα δύο λεπτά. Μαζί με αυτή την απαίτηση ένα απολυμαντικό πρέπει να περιέχει ενεργές ουσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον το λιγότερο δυνατό παρά το αξιόπιστο αποτέλεσμά τους.

Τομείς εφαρμογής:

Το Big Spray είναι ένα έτοιμο προς χρήση αλκοολούχο διάλυμα για την ταχεία απολύμανση συσκευών και επιφανειών σε όλους τους κρίσιμους νοσοκομειακούς χώρους, όπως χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., ασθενοφόρα, για την απολύμανση χειρουργικών υποδημάτων και ρουχισμού, στρωμάτων, μαξιλαριών, κουβερτών, κινητού εξοπλισμού, σε ιατρικές και οδοντιατρικές πρακτικές και σε βοηθητικούς ιατρικούς χώρους.

Προφυλάξεις:

Τα αλκοολούχα απολυμαντικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απολύμανση μεγάλων επιφανειών (κίνδυνος ανάφλεξης).

Το Big Spray είναι αποτελεσματικό σε:

- Βακτήρια (συμπερ. TB)
- Μύκητες
- Ιούς (συμπερ. HBV/HIV)

Χρήση:

Έτοιμο για χρήση με ψεκασμό:

Ψεκάζουμε τις επιφάνειες έως ότου αυτές να διαβρεχθούν πλήρως. Τρίβουμε και σκουπίζουμε με καθαρό πανί.

Χρόνος επαφής: 2 λεπτά (σύμφωνα με OGHMP)
5 λεπτά (DGHM)

Ενεργά Συστατικά:

Αιθανόλη	25,92%
2-Προπανάλη	11,50%
Alkylbiguamid	0,054%

Φυσικά και χημικά Χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση	: Διαυγές άχρωμο υγρό
Οσμή	: Αλκοόλη
pH	: περ. 5 στους 20 °C
Διάλυση σε νερό (H ₂ O)	: 50%
Πυκνότητα	: 0,94 στους 20 °C
Ιξώδες	: περ. 2 mPa's στους 20 °C
Σημείο ανάφλεξης	: 24 °C DIN51755

Τύποι συσκευασίας:

- Χαρτοκιβώτιο με 10 πλαστικά δοχεία του 1 lt και συσκευές ψεκασμού.

Μελέτες ειδικών:

Ελεγμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του γερμανικού οργανισμού OGHMP και DGHM (Osterreichische Gesellschaft for Hygiene, Mikrobiologie und Praventivmedizin/ Deutsche Gesellschaft for Hygiene und Mikrobiologie) – οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακές και καθημερινές (στην πράξη) συνθήκες: Prof. Dr. Rotter, Vienna / Austria
Prof. Dr Werner, Schwerin / Germany, κλπ.
Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008.

Εγκρίσεις:

Αρ. Αδείας Ε.Ο.Φ.: ΑΠ- 00230/3-10-07
Αρ. Αδείας Γ.Χ.Κ.: 10077/0/2006