

neodisher® IP Spray

Λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων σε μορφή σπρέι



Τομέας εφαρμογής:

Για την χειρονακτική λίπανση των χειρουργικών εργαλείων, ειδικά για τα εργαλεία με αρθρώσεις.

Χαρακτηριστικά:

Το neodisher IP Spray έχει ως βάση υγρή παραφίνη υψηλής καθαρότητας (λευκά έλαια άριστης ποιότητας επιπέδου φαρμακοβιομηχανίας και βιομηχανίας τροφίμων) και χρησιμοποιείται για την άμεση λίπανση των χειρουργικών εργαλείων μετά από αυτόματο καθαρισμό όταν η λίπανση στο πλυντήριο απολυμαντή είναι ανεπαρκής ή όταν δεν χρησιμοποιείται το προϊόν neodisher IP Konz στο πλυντήριο απολυμαντή.

Το neodisher IP Spray

δεν δημιουργεί ιζήματα

έχει αποδειχθεί πως δεν επηρεάζει μεταγενέστερη αποστείρωση με ατμό ή θερμό αέρα

είναι ελεύθερο CFCs

είναι τοξικολογικά αβλαβές

Εφαρμογή και δοσολογία:

Ψεκάστε απευθείας το neodisher IP Spray στα εργαλεία, ειδικά στις αρθρώσεις. Κρατήστε το δοχείο όσο το δυνατόν κάθετα, ενόσω ψεκάζετε.

Για τον ψεκασμό των δίσκων χειρουργικών εργαλείων παρακαλώ χρησιμοποιείτε το προϊόν με κοντύτερο σωλήνα ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό ο σωλήνας ψεκασμού με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος. Στη συνέχεια επανατοποθετείστε τον σωλήνα ψεκασμού στο δοχείο ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα ψεκασμού.

Η επεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα διατάγματα που αφορούν την Οδηγία για τις Ιατροτεχνολογικές Συσκευές και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλα αξιολογημένες διαδικασίες.

Παρακαλούμε όπως παρατηρήσετε τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή των εργαλείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της DIN EN ISO 17664.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Τοξικολογικές Μελέτες/ Εγκρίσεις:

Εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί όπως προτείνεται, είναι τοξικολογικά ασφαλές (αξιολόγηση σύμφωνα με EN ISO 10993-1). Μία περίληψη του τοξικολογικού προφίλ είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί.

Όλα τα συστατικά του προϊόντος neodisher IP Spray είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς του FDA που περιγράφονται στο 21CFR τμήμα 170,3 ή 170,39 αντίστοιχα.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de

neodisher[®] IP Spray

Λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων σε μορφή σπρέι



Συστατικά:

< 5 % μη ιονικά τασιενεργά
> 30% αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (λευκό έλαιο άριστης ποιότητας επιπέδου φαρμακοβιομηχανίας και βιομηχανίας τροφίμων), προωθητικό αέριο.

Σήμανση CE:

Το neodisher IP Spray είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ιατροτεχνολογικές Συσκευές 93/42/EEC, παράρτημα I.

Εγκρίσεις:

Ο φάκελος του προϊόντος neodisher IP Spray έχει ελεγχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους για την νόμιμη κυκλοφορία του.

Οδηγίες αποθήκευσης:

Η αποθήκευση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία από 5 °C έως 30°C. Διάρκεια ζωής του προϊόντος 4 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως προτείνεται.

Για την ημερομηνία λήξης, συμβουλευτείτε την εκτύπωση πάνω στο δοχείο.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός σύμφωνα με την Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 1999/45/EC και την Οδηγία για τα Αεροζόλ 75/324/EEC για το συμπυκνωμένο διάλυμα όπως αυτό παραδίδεται.

Σύμβολο ασφαλείας F + - Εξαιρετικά εύφλεκτο.

Φράσεις κινδύνου:

R 12 - Εξαιρετικά εύφλεκτο

R 67 - Οι ατμοί του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζάλη.

Δοχείο υπό πίεση. Προστατέψτε το προϊόν από την ηλιακό φως και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C. Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο ακόμα και μετά την χρήση του.

Φράσεις ασφαλείας:

S16 - Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

S23 - Μην εισπνέετε το αεροζόλ

S51 - Χρήση σε καλά αεριζόμενους χώρους

Απορρίψτε το δοχείο μόνο όταν αυτό είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.drweigert.de στον τομέα Service.

MB 4304 GB/2-4
Ημερομηνία αναθεώρησης
03/2012



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de