

# SURFANIOS Premium

Απορρυπαντικό  
απολυμαντικό  
για δάπεδα και  
επιφάνειες



- Διπλή δράση: συνδυασμός απορρυπαντικής και απολυμαντικής δράσης σε μία διαδικασία
- Δραστικό έναντι βακτηρίων και μυκήτων απομονωμένων από νοσοκομειακό περιβάλλον
- Προϊόν χωρίς αλδεΐδες
- Βέλτιστο οικολογικό και τοξικολογικό προφίλ

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καθαρισμός και απολύμανση δαπέδων, τοίχων, μηχανημάτων, περιλαμβανομένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάλυμα πράσινου χρώματος
- pH συμπυκνωμένου προϊόντος: 11.2
- pH διαλύματος (δοσολογία 0,25%): περίπου 8
- Πυκνότητα: 1,007
- Δείκτης διάθλασης: 1,3587


ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ  
ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΛΥΣΗ  
20 ml > 8 ΛΙΤΡΑ




# SURFANIOS Premium

Απορρυπαντικό απολυμαντικό για δάπεδα και επιφάνειες

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

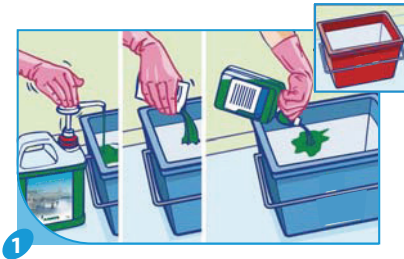

1 Γεμίστε ένα κουβά για το απολυμαντικό και ένα κουβά για το ξέβγαλμα με 8 λίτρα νερό τον κάθε ένα. Δοσολογία **0,25%** : Προσθέστε μια δόση με 20 ml SURFANIOS PREMIUM στον κουβά του απολυμαντικού.

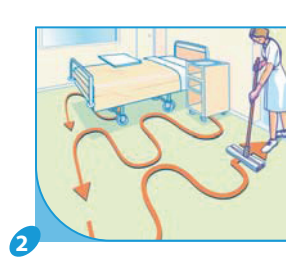

2 Προχωρήστε στον καθαρισμό σύμφωνα με το διάγραμμα: από τις άκρες του δωματίου προς την έξοδο. (μην ξεβγάξετε τις επιφάνειες).



3 Ξεβγάξετε και στύβετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας πριν να την βουτήξετε στον κουβά του απολυμαντικού (Μην βάζετε το τρόλεϋ καθαρισμού μέσα στο δωμάτιο, πρέπει να παραμένει στον διάδρομο).



4 Αλλάζετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας μετά τον καθαρισμό κάθε περιοχής και ανανεώνετε ταυτόχρονα το καθαριστικό και ξεβγαλτικό διάλυμα. Τοποθετείτε την λερωμένη κεφαλή της σφουγγαρίστρας σε κατάλληλο δοχείο.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

N- (3 αμινοπροπυλο)- N-δωδεκυλοπροπανο-1,3 διαμίνη – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), Διδευκυλο διμεθυλο χλωριούχο αμμώνιο – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), έκδοχα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης (που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/45/EC και τις αναπροσαρμογές της). Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με προσοχή. Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν.

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +35°C.

Βιοκτόνο προϊόν για απολύμανση επιφανειών (Κύρια ομάδα 1 – Π.Τ. 2). Προϊόν για επαγγελματική χρήση μόνον.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο με 4 δοχεία των 5 λίτρων και 1 δοσομετρική αντλία των 20 ml .....κωδ. είδους 1917.036
- Χαρτοκιβώτιο με 12 δοχεία του 1 λίτρου.....κωδ. είδους 1917.092
- 500 φακέλισκοι των 20 ml .....κωδ. είδους 1917.129

## ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό σε	Πρότυπα	Χρόνος επαφής		
		0,25%	0,5%	1%
Βακτήρια	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 λεπτά		
	BMR (EN 1276)	5 λεπτά		
	EN 13697	30 λεπτά	15 λεπτά	
	BMR (EN 13697)	15 λεπτά		
Μυκοβακτήρια	Μυκοβακτήριο terrae (EN 14348)	60 λεπτά	30 λεπτά	
	Μυκοβακτήριο terrae (EN 14563)	60 λεπτά	30 λεπτά	
Ζύμες	EN 1275, EN 1650	15 λεπτά		
	EN 13697	30 λεπτά	15 λεπτά	
Μύκητες	EN 1275	15 λεπτά		
	EN 13697	30 λεπτά		15 λεπτά
	EN 1650	120 λεπτά		
Ιοί	Σύμφωνα με την EN 14476 HIV-1, PRV (υποκατάστατο του HBV), BVDV (υποκατάστατο του HCV) και Herpesvirus	5 λεπτά		
	Vacciniavirus	60 λεπτά	15 λεπτά	

