

ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΔΥΣΦΟΡΙΑ & ΚΟΠΩΣΗ; ΕΧΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ;

**ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ**

-O-PUR- ΚΑΘΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Παράγει: F.W. KLEVER GmbH - Γερμανίας

- Είναι ένα βοήθημα και μια πηγή ενέργειας για άτομα κουρασμένα ή με έντονο ρυθμό ζωής.
- Αποτελεί βοήθημα σε άτομα με προβλήματα Άσθματος, Υπερήλικες, μετά από Αλλεργικό Σοκ.
- Συνιστάται για χρήση πριν ή και μετά από κάθε έντονη σωματική ή πνευματική κόπωση, αθλητικές δραστηριότητες, κ.ά.
- Ελαχιστοποιεί τις βλαβερές επιδράσεις του καπνού και του νύχτικου.

**ΤΟ O-PUR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ**

Οδηγίες Χρήσης: ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

1. Αποσπάστε τη μάσκα εισπνοής από τη φιάλη.
2. Αναστρέψτε τη μάσκα και ξανατοποθετήστε τη στη φιάλη έτσι ώστε το κάτω μέρος της μάσκας να εφαρμόζει στη βαλβίδα εκροής της φιάλης.
3. Κρατώντας τη φιάλη με το ένα χέρι εφαρμόστε τη μάσκα εισπνοής προς το στόμα έτσι ώστε η εσοχή της να εφαρμόζει στη μύτη. Ενώ εισπνέετε, πιέστε με το άλλο χέρι την προεσοχή στο κάτω μέρος της μάσκας για να απελευθερωθεί οξυγόνο (Ακούγεται η ροή).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Να πιέζετε την προεσοχή της μάσκας ΜΟΝΟ όταν εισπνέεται. Διαφορετικά χάνεται οξυγόνο χωρίς λόγο. Την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να επαναλαμβάνεται όσο συχνά θέλετε.

Κάθε φιάλη O-PUR βάρους 150 γρ. περιέχει:

- 8 λίτρα καθαρού οξυγόνου 99,5%.
- Δεν περιέχει άλλα προωθητικά αέρια.
- Με φυσιολογική ένταση εισπνοής εξασφαλίζει 70 έως 80 εισπνοές.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 40°C, μακριά από το ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
Μακριά από το ψύχος.