

ANIOSYME DD1

Καθαρισμός και
απολύμανση
χειρουργικών εργαλείων



- Κατοχυρωμένη σύνθεση
- Το πρώτο τρι-ενζυματικό υγρό απορρυπαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες
- Ειδικά σχεδιασμένο για την συλλογή ακάθαρτων χειρουργικών εργαλείων: αποφυγή επιμόλυνσης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ενισχυμένος καθαρισμός και απολύμανση ιατρικών - χειρουργικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών συσκευών και ενδοσκοπικού εξοπλισμού.
- Καθαρισμός με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων
- Συλλογή ακάθαρτων εργαλείων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το πρώτο ενζυματικό υγρό απορρυπαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες.
- Σύμπλεγμα τριών ενζύμων: πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση, σε συνδυασμό με τασιενεργά
- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (DCP*).

*Καθαριστική Δράση έναντι Λιποειδών Ρύπων

- Σύνθεση ελεύθερη χλωρίου: μη οξείδωση των υλικών
- Σύνθεση ελεύθερη αλδεϋδών: μη σταθεροποίηση των πρωτεϊνών
- Σταθερότητα του διαλύματος εμβάπτισης: 8 ώρες (μία βάρδια εργασίας)
- Αποδεδειγμένη σταθερότητα των ενζύμων
- Ουδέτερο pH: συμβατό με κράματα μετάλλων
- Απουσία χλωρίου (προπιονικό αμμώνιο): μη διαβρωτική δράση με τα υλικά
- Συμβατό με επεξεργασία και σε υπερήχους
- Διαυγές υγρό, μπλε, αρωματισμένο

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ
ΑΡΑΙΩΣΗ
25 ml > 5L






ANIOSYME DD1

Καθαρισμός και απολύμανση χειρουργικών εργαλείων


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

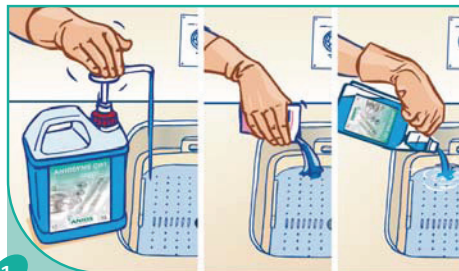

1


Αραίωση 0.5 %:

Προσθέστε μία δόση 25 ml σε 5 λίτρα κρύου ή χλιαρού νερού βρύσης

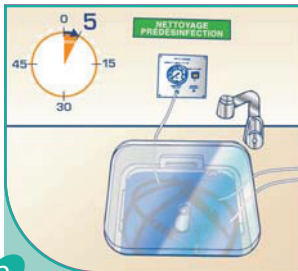


2

Βυθίστε πλήρως την ιατρική συσκευή. **Προτεινόμενος χρόνος βυθισμού: 5 λεπτά.** Βουρτσίστε όταν απαιτείται. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: βουρτσίστε εσωτερικά τα κανάλια.

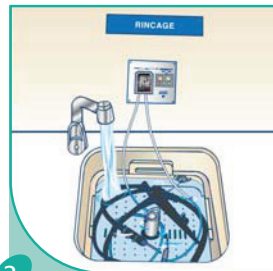

3

Ξεβγάλετε σχολαστικά με νερό βρύσης (καλής μικροβιολογικής ποιότητας). Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής

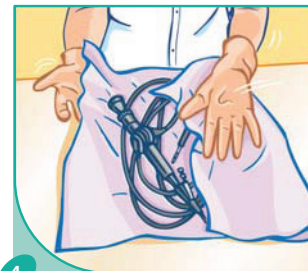

4

Στεγνώστε με καθαρή πετσέτα. Συνεχίστε στο επόμενο βήμα (δείτε το πρωτόκολλο που έχει καθορισθεί από την Υπηρεσία σας).

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Προπιονικό τεταρτοταγές αμμώνιο, πολυεξαμεθυλενο υδροχλωρική διγλουανίδη, σύμπλεγμα ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση και αμυλάση), επιφανειοδραστικοί παράγοντες, σταθεροποιητικοί παράγοντες, αποσκληρυντικοί παράγοντες, άρωμα, χρώμα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης (σε συμμόρφωση με την Οδηγία 99/45/EC και τις προσαρμοσμένες της εκδόσεις). Αποθήκευση από +5°C έως +35°C. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb (Οδηγία 93/2/EEC όπως τροποποιήθηκε).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 δοχεία των 5 λίτρων με μία δοσομετρική αντλία των 25 ml Ref. 1200.036

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό σε	Πρότυπα	Χρόνος επαφής
Βακτήρια	EN 1040, EN 13727 (ρυπαρές συνθήκες : αλβουμίνη και ερυθροκυτίνη), MRSA (EN 13727)	5 λεπτά
Μυκοβακτήρια	Μυκοβακτήριο φυματίωσης (T.B.)	5 λεπτά
Ζύμες	EN 1275, EN 13624	15 λεπτά
Ιοί	HIV-1, BVDV (υποκατάστατο του HCV), Herps virus, Influenza virus A [H ₁ N ₁]	5 λεπτά
	PRV (υποκατάστατο του HBV)	10 λεπτά

