




neodisher® Septo DN

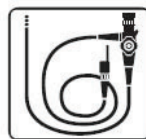

Απολυμαντικό για την αυτόματη επεξεργασία εύκαμπτων ενδοσκοπίων



Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

Για την απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων και θερμοανθεκτικών εργαλείων σε πλυντήρια-απολυμαντές.

Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνος δράση. Επιβεβαιώνεται με πιστοποίηση.

Για τον καθαρισμό προτείνεται το απορρυπαντικό neodisher MediClean forte.

Η διαδικασία επεξεργασίας πλύσης – απολύμανσης με το neodisher MediClean forte και το neodisher Septo DN στο πλυντήριο Wassenburg Adaptascope WD 440 επιτυγχάνει συνολική μείωση των μικροβίων $> 9 \log_{10}$ σύμφωνα με τις υπάρχουσες απαιτήσεις της οδηγίας DIN EN ISO 15883-4. Η δράση του επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά της διαδικασίας.

Ειδικές ιδιότητες:

Ειδικά άοσμο.

Υψηλή υλική ανοχή. Κατάλληλο για τα ενδοσκόπια όλων των μεγάλων κατασκευαστών.

Χωρίς φορμαλδεΰδη και άλατα τεταρτογενούς αμμωνίου.

Εφαρμογή και δοσολογία:

Η παροχή του neodisher Septo DN γίνεται μέσω της δοσομετρικής αντλίας του πλυντηρίου στην αρχή της φάσεως απολύμανσης.

Για βακτηριοκτόνο/μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο δράση	1.0%, 55 °C, 5 min
	1.0%, 50 °C, 10 min

Γενικές οδηγίες για τη χρήση:

Μόνο για επαγγελματική χρήση!

Το διάλυμα neodisher Septo DN πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς με νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο).

Ξεβγάλετε το δοσομετρικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του δοσομετρικού σωλήνα αναρρόφησης πριν αλλάξετε προϊόν.

Παρακαλούμε, όπως μελετήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας DIN EN ISO 17664.

Οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για το πλυντήριο-απολυμαντή θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά.

Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de



neodisher® Septo DN

Κλινικές μελέτες:

Η απολυμαντική δράση επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά. Αντίγραφα των κλινικών μελετών είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τιμή pH	7.3 (1.0%, υπολογισμένο σε αποσκληρυμένο νερό, (από 2.7 mmol/l σε 0 mmol/l, 20 °C) 4.2 (1.0%, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Πυκνότητα	1.0 g/cm ³ (20 °C)
Ιξώδες	<10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)

Συστατικά:

Απολυμαντικοί παράγοντες σε 100 g. 6.0 g γλυοξάλη, 3.5 g γλουταραλδεϋδη

Σήμανση CE: **CE** 0297

Το neodisher Septo DN συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EC, Παράρτημα I, που αφορά τις ιατρικές συσκευές.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30 °C.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση που ακολουθεί, στην ετικέτα του δοχείου, το σύμβολο της κλεψύδρας ⚙.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 1999/45/EC για το συμπυκνωμένο προϊόν όπως αυτό διατίθεται.

Σύμβολο επικινδυνότητας Χn – επιβλαβές περιέχει: γλουταραλδεϋδη <10%, γλυοξάλη

Φράσεις κινδύνου:

- R 20/22 – Επιβλαβές κατά την εισπνοή και την κατάποση.
- R 37/38 – Ερεθιστικό για το αναπνευστικό και το δέρμα.
- R 41 – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια.
- R 42/43 – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και έρχεται σε επαφή με το δέρμα.
- R 68 – Πιθανός κίνδυνος μόνιμων βλαβών.

Φράσεις ασφαλείας:

- S 7 – Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
- S 23 – Μην αναπνέετε ατμούς / αεροζόλ.
- S 36/37/39 – Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά ματιών / προσώπου.
- S-46 – Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Διαθέστε προς απόρριψη μόνο όταν το δοχείο είναι κενό και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, αναφερθείτε στο Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της E.E. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.de στην κατηγορία «Υπηρεσίες».

Διαθέσιμη Συσκευασία	Περιεχόμενο
Δοχείο	20 λίτρων
Δοχείο	10 λίτρων
Δοχείο	5 λίτρων

MB 4010/3-1
03/2010



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de